



ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROVERE KOJE TREBA IZVRŠITI

Prilikom svakog čišćenja i dezinfekcije, na početku i na kraju tretmana.

- Čistoća unutrašnjosti i spoljašnjosti
- Popis i lokacija bilo kakvih oštećenja. Promenite ga u slučaju: posekotina, pukotina ili rascapa, kidanja zalepljenog ili ušivenog spoja ili kvara na rajsferšlus.
- U slučaju oštećenog proizvoda (deformacija pene, gubitak tvrdoće uz savijanje, curenje), u slučaju postojanog neprijatnog mirisa, zamenite medicinsko sredstvo.

ČIŠĆENJE - DEZINFEKCIJA - POPRAVKA

Informacije namenjene zdravstvenim radnicima
Medicinska sredstva zahtevaju rigorozne higijenske postupke. Za čitav postupak čišćenja i dezinfekcije preporučuje se upotreba rukavica i zaštite za oči.

Čišćenje, dezinfekcija i popravka moraju se izvršiti u skladu sa smernicama i preporukama zdravstvenih i higijenskih nadležnih organa.

Prilikom ponovnog pakovanja, uverite se da su priložena uputstva za upotrebu za sledeću postavku.

Preporučuje se evidencija kontrola i održavanja proizvoda.

Čišćenje i dezinfekcija navlake

Učestalost:

- svaki put prilikom promene posteljine
- u slučaju kontaminacije
- nakon svakog odlaska pacijenta

Čišćenje: Čišćenje površine maramicom/sunderom blago nakvašenim sapunicom, a zatim ispiranje maramicom/sunderom nakvašenim čistom vodom.

Dezinfekcija: Dezinfekcija površine maramicom/sunderom blago nakvašenim pH neutralnim deterdžentom za dezinfekciju površina prilagođenim za medicinska sredstva (u skladu sa postupkom koji preporučuje proizvođač korišćenog proizvoda). Nastavite sa završnim ispiranjem maramicom/sunderom blago nakvašenim čistom vodom. Temeljno osušite. Nemojte koristiti korozivne proizvode ili abrazivne materijale.

Pranje navlake u veš mašini

- nakon svakih 20 dezinfekcija navlake prskanjem
- nakon svakog odlaska pacijenta

Navlaka od fine tkanine (samo za upotrebu za jednog pacijenta)



Moguće pranje u veš mašini na 65°C. Sušenje u bubnju na umerenoj temperaturi. Nemojte peglati. Nemojte nositi na hemijsko čišćenje. Nemojte koristiti korozivni proizvod ili abrazivni materijal.

POLYFILM® navlaka (samo za upotrebu za jednog pacijenta)



Operite u antiseptičkoj sapunici, isperite čistom vodom. Osušite napolju. Samo ručno pranje. Nemojte koristiti izbeljivač. Nemojte peglati. Nemojte koristiti mašinu za sušenje veša. Nemojte peglati. Nemojte koristiti korozivne proizvode ili abrazivne materijale.

POLYMAILLE® i POLYMAILLE®HD navlake:



Moguće pranje u veš mašini na 95°C. Maksimalno dozvoljena koncentracija hlora <1000 ppm (u tom slučaju, obavezno ispiranje čistom vodom). Sušenje u bubnju na umerenoj temperaturi. Nemojte peglati. Nemojte nositi na hemijsko čišćenje. Nemojte koristiti korozivni proizvod ili abrazivni materijal.

Mere predostrožnosti koje treba preduzeti:

- Uvek ostavite navlaku da se dobro osuši pre nego što njome pokrijete proizvod (opasnost od pojave plesni u slučaju da se oprema prekrije vlažnom ili loše osušenom navlakom).
- Redovno proveravajte (prilikom svakog servisiranja) stanje navlake zbog mogućih cepanja, probijanja, znakove abrazije, i prestanite s upotrebom medicinskog sredstva ako navlaka ima problem sa oštećenjima.
- Koristite identičnu rezervnu navlaku ako se oprema koristi tokom čišćenja navlake.

Čišćenje i dezinfekcija unutrašnjosti proizvoda

Učestalost:

- svaki put kada se navlaka skida radi pranja
- u slučaju oštećenja navlake
- nakon svakog odlaska pacijenta

Čišćenje: Čišćenje površine maramicom/sunderom blago nakvašenim sapunicom, a zatim ispiranje maramicom/sunderom nakvašenim čistom vodom.

Dezinfekcija: Dezinfekcija površine maramicom/sunderom blago nakvašenim pH neutralnim deterdžentom za dezinfekciju površina prilagođenim za medicinska sredstva (u skladu sa postupkom koji preporučuje proizvođač korišćenog proizvoda). Nastavite sa završnim ispiranjem maramicom/sunderom blago nakvašenim čistom vodom. Temeljno osušite. Nemojte koristiti korozivne proizvode ili abrazivne materijale.

Oprez:

- Nemojte potapati u penu
- Ostavite proizvod da se osuši na vazduhu pre postavljanja navlake na proizvod (opasnost od pojave plesni u slučaju da se unutrašnjost prekrije vlažnom ili loše osušenom navlakom)
- Nemojte koristiti korozivne proizvode ili abrazivnu opremu.
- Nemojte koristiti ili ponovo koristiti kontaminirani proizvod, ili ako nije očišćen i dezinfikovani.

Lista proizvoda koji se preporučuju / ne preporučuju

Proizvodi za dezinfekciju (neiscrpna lista):

Hladni sprejevi za dezinfekciju koji sadrže kvartarne amonijume, aminokiseline, glutaraldehide, bigvanide, propionat didecildimetil, alkilamin, etilni i izopropilni alkohol (manje od 30 % koncentracije alkohola), rastvor koji sadrži hlor (koncentracija manja od 1000 ppm, ispiranje čistom vodom obavezno).

Zabranjeni rastvori

Nemojte koristiti rastvore koji sadrže: fenol, neorganske kiseline u visokim koncentracijama, krezol, kaustičnu sodu.

GARANCIJA

Dve godine u slučaju fabričkih grešaka, od datuma kupovine od strance kupca. Male nepravilnosti (male pukotine, prošaranost, površinski nedostaci itd) zbog proizvodnog procesa ni na koji način ne utiče na kvalitet i efikasnost proizvoda i ne mogu biti razlog za zamenu proizvoda po osnovu garancije. Garancija ne pokriva pogrešnu upotrebu nosača, uobičajena trošenja i habanja proizvoda ili njegovih navlaka. U slučaju oštećenja, obratite se svom dobavljaču i dajte mu serijski broj proizvoda.

SIMBOLI

	Proizvođač + datum proizvodnje:		Držati dalje od vlage
	CE oznaka		Držati dalje od sunčeve svetlosti
	Medicinsko sredstvo		Sastav gornjeg sloja navlake
	Br. artikla		Sastav punjenja
	Broj serije		Sastav donjeg sloja navlake
	Pogledati uputstvo za upotrebu		Broj artikla rezervne navlake
	Lomljivo, pažljivo rukovati		