



ORTOPEDIJA
novi život

Firma: ORTOPEDIJA - NOVI ŽIVOT DOO
BEOGRAD
Adresa: Ustanička 234 A
Telefon: +381 11 7621 953
Fax: +381 11 7621 956
PIB: 100025109
E-mail: b2c@ortopedija.co.rs

5000 KOMPRESA ZA GREJANJE I HLAĐENJE
KOLENA

Cena: 1.400,00 rsd.

Šifra: 2215437

Kategorija proizvoda: TERMOGEL OBLOGE

Proizvođač: ORTHOLAND



KAKO SE KORISTI?

HLADNA PRIMENA

Koristiti nakon što proizvod odstoji u zamrzivaču 1-2 sata. Napraviti pauzu nakon maksimalno 20 minuta korišćenja ili ranije ukoliko osetite nelagodnost.

TOPLA PRIMENA

Zagrevati proizvod u mikrotalasnoj pećnici 30 sekundi ili ga potopiti u toplu vodu na 4 do 8 minuta dok ne dostigne željenu temperaturu, zatim koristiti. Ako je proizvod previše vruć, ostaviti ga da se ohladi do odgovarajuće temperature pre upotrebe.

3 U 1

Zahvaljujući kvalitetnoj izradi od tkanine, termogel se može koristiti duži vremenski period. Pošto je osetljivost kože različita na stopalima i na licu, preporučuje se da proizvod prvo testirate pre upotrebe.

Izbegavajte primenu kada je proizvod ekstremno hladan ili ekstremno vruć.

Proizvod se može koristiti sve dok se ne ošteti (pocepa).