

5005 KOMPRESA ZA GREJANJE I HLAĐENJE ZA
ZGLOB RUKE/NOGE

Cena: 1.350,00 rsd.

Šifra: 2215442

Kategorija proizvoda: TERMOGEL OBLOGE

Proizvođač: ORTHOLAND



KAKO SE KORISTI?

HLADNA PRIMENA

Koristiti nakon što proizvod odstoji u zamrzivaču 1–2 sata. Napraviti pauzu nakon maksimalno 20 minuta korišćenja ili ranije ukoliko osetite nelagodnost.

TOPLA PRIMENA

Zagrevati proizvod u mikrotalasnoj pećnici 30 sekundi ili ga potopiti u toplu vodu na 4 do 8 minuta dok ne dostigne željenu temperaturu, zatim koristiti. Ako je proizvod previše vruć, ostaviti ga da se ohladi do odgovarajuće temperature pre upotrebe.

3 U 1

Zahvaljujući kvalitetnoj izradi od tkanine, termogel se može koristiti duži vremenski period. Pošto je osetljivost kože različita na stopalima i na licu, preporučuje se da proizvod prvo testirate pre upotrebe.

Izbegavajte primenu kada je proizvod ekstremno hladan ili ekstremno vruć.

Proizvod se može koristiti sve dok se ne ošteti (pocepa).