

5008 KOMPRESA ZA GREJANJE I HLAĐENJE 27X35

**Cena: 1.400,00 rsd.**

Šifra: 2215445

Kategorija proizvoda: TERMOGEL OBLOGE

Proizvođač: ORTHOLAND

#### KAKO SE KORISTI?

##### HLADNA PRIMENA

Koristiti nakon što proizvod odstoji u zamrzivaču 1-2 sata. Napraviti pauzu nakon maksimalno 20 minuta korišćenja ili ranije ukoliko osetite nelagodnost.

##### TOPLA PRIMENA

Zagrevati proizvod u mikrotalasnoj pećnici 30 sekundi ili ga potopiti u toplu vodu na 4 do 8 minuta dok ne dostigne željenu temperaturu, zatim koristiti. Ako je proizvod previše vruć, ostaviti ga da se ohladi do odgovarajuće temperature pre upotrebe.

#### 3 U 1

Zahvaljujući kvalitetnoj izradi od tkanine, termogel se može koristiti duži vremenski period. Pošto je osetljivost kože različita na stopalima i na licu, preporučuje se da proizvod prvo testirate pre upotrebe.

Izbegavajte primenu kada je proizvod ekstremno hladan ili ekstremno vruć.



Proizvod se može koristiti sve dok se ne ošteti (pocepa).